
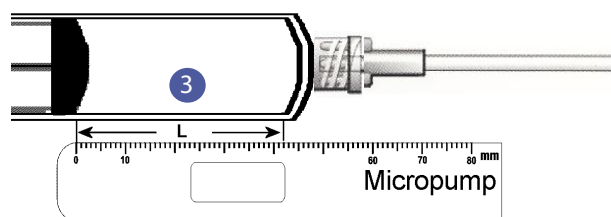


Vorbereitung

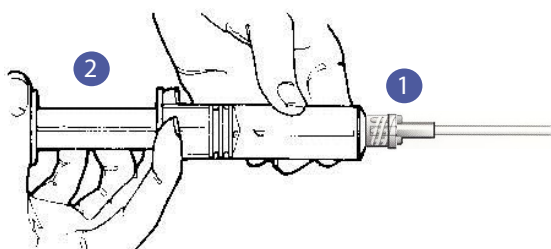

1. Vul de spuit en koppel de infusieset
2. Ontlucht de spuit + infusieset manueel

3. Bepaal het debiet
Meet de lengte in millimeter van het volume dat in de spuit zit (L) na het ontluchten.

De pomp bedienen



48



60



De pomp loopt.
Tijdens de infusie
draait een ellips
symbool

48

1. Pomp aanzetten
Druk 3 sec lang tegelijk
op de twee pijltjes

2. Het debiet instellen
Stel de gewenste snelheid
(L) in met de pijltjes

3. Start de infusie
Druk lang op de enter-
toets tot GO op het dis-
play verschijnt

Een bolus geven



Dosis verschijnt op
display en loopt op
tot aan de gewenste
hoeveelheid


20.5

1. Klik tegelijk op de
pijltje naar boven en de
enter-toets

2. Stel de dosis in mm
in m.b.v. de pijltjes

3. Druk lang op de
enter-toets om de bolus
toe te dienen

Waarschuwingen

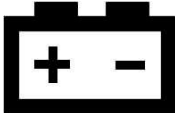Signaal van laag batterijvermogen; De pomp loopt nog ca. 24 uur. Vervang de batterijen wanneer de infusie is voltooid. Om het alarm stil te zetten, drukt u op een knop.		Om de minuut een piep
De pomp verwerpt een snelheidswijziging of bolus die niet binnen 5 seconden is bevestigd door op de Enter-knop te drukken.		Snelheid: Vier piepjes Bolus: lang kort kort
Snelheid op display knippert als de pomp in stand-by staat (infusie loopt niet).		Om de minuut een piep
Infusie bijna voltooid. Dit bericht wordt weergegeven als er nog 5 mm te infuseren zijn. Dit bericht wordt alternerend met de snelheid weergegeven.		Drie piepjes

Alarmen

Bij een alarm stopt de infusie, het symbool  verschijnt, samen met het alarmidentificatiebericht. De pomp laat een onderbroken alarmsignaal horen. Door op een knop te drukken zal het alarm één uur worden stilgezet. Zet de pomp uit om het alarm te annuleren.

Occlusie: Verwijder de spuit of koppel de extensieset los om de druk vrij te geven, verwijder de obstructie en hervat de infusie door op de ENTER-knop te drukken.	
Lege batterij: Zet de pomp UIT en vervang de batterijen.	
Pomp één uur op stand-by. Zet de pomp opnieuw AAN.	
Einde van Infusie. Zet de pomp uit en verwijder de spuit.	
Interne fout. Zet de pomp uit en weer aan. Als het alarm zich blijft voordoen, noteer de foutcode en contacteer Laméris.	
E10 en E11-alarmen: Functietoetsen lang ingedrukt. Zet de pomp uit en weer aan. Dit is een veiligheidsfunctie, om onopzettelijke wijziging van de snelheid te voorkomen.	
Foutieve plaatsing van de spuit. Controleer of de spuit correct geplaatst is en hervat de infusie.	